

# POLYGRAM NET®

## Version 4.2

Vi är glada över att kunna presentera en ny version av POLYGRAM NET® version 4.2. Denna version har ett flertal nya funktioner och förändringar.

### **VIKTIGT:**

Medtronic och SynMed Medicinteknik AB kan inte ta ansvar för att patientundersökningar går förlorade på grund av fel på hårddisken. Som med all datorsystem är det användarens ansvar att med jämna mellanrum backa upp patientdatabasen i den händelse hårddisken skulle sluta fungera. Det är användarens ansvar att skapa en back-up av Polygram NET databasen med den backuprutin som finns beskriven i POLYGRAM NET® Reference Manuals. Det är också användarens ansvar att kopiera backupfilerna till ett nätverksbibliotek eller till annat lagringsmedia (t ex CD eller DVD) och spara på ett säkert ställe.

### **GENERELLA FÖRBÄTTRINGAR**

#### *Användarhandbok för installation och uppdateringar:*

- En ny **Användarhandbok för installation och uppdatering** följer med installationen. Den finns översatt till svenska och finns på installations-CD:n

#### **Disclaimer Policy:**

- Om en systemuppdatering görs som påverkar komponenter som används av POLYGRAM NET® kommer en Disclaimer dialog att visas. Det är nu möjligt att godkänna att dessa ändringar har gjorts och inte få upp dialogrutan förrän en ny uppdatering har gjorts.

#### **Förbättrat användarinterface i uppdateringsverktyget:**

- Uppdatering av tidigare version av POLYGRAM NET® har förenklats så att användaren själv kan uppdatera sitt system. Följ informationen som finns i ”Användarhandboken för installation och uppdatering” som levereras med uppdateringen.

#### **Datum följer Nationella Inställningar:**

- Datum- och tidsformat i POLYGRAM NET® följer nu de Nationella Inställningarna som väljs i Kontrollpanelen under Nationella Inställningar.

#### **Förbättrade rapporter:**

- Enbart tabeller med verkliga testresultat visas i rapporten. Tomma tabeller kommer inte att läggas in i rapporten.

- Programmet delar automatiskt tabeller över flera sidor när detta är nödvändigt, kopierar överskriften i tabellerna till varje ny sida som behövs. Detta minskar behovet att kundanpassa rapporterna i efterhand när rapporten väl är klar.

#### **FÖRBÄTTRINGAR med pH applikation:**

- De nya temperaturkorrektionsfaktorerna för Slimline™ (samma som för Versflex) kommer nu automatiskt att godkännas och dialogrutan som varnar för felaktiga korrektionsfaktorer kommer inte att visas när du laddar upp data från Digitrapper.
- Katetrar från Zinetics har bytt namn till Z24.

#### **FÖRBÄTTRINGAR med esofagusmanometri applikation:**

- Analysen för LES vilotryck har förbättrats. Denna analys kan nu identifiera vilotrycket som baseras på endexpiratoriskt tryck. För mer detaljer och principer för denna analys ber vi dig att referera till Referensmanualen på engelska.
- I analysen för LES relaxation kan du nu begränsa gränsvärdet för residualtrycket till ett värde mellan 0 och 100%. Ett värde mindre än 0 kommer att rapporteras som 0. På samma sätt kommer värden större än 100% att rapporteras som 100%.

För att aktivera dessa begränsningar i rapporterad värden väljer du checkboxen “Begränsa residualtryck och procent relaxation” för protokollinställningarna i LES relaxationsanalysen. För alla tidigare inspelade undersökningar kommer denna funktion inte vara förvald. Dessa rapporter måste redigeras för att inte visa resultat utanför området 0 till 100%.